

Kupferspirale

Hormonfreie Verhütung



EURIM
PHARM



Deine individuelle Verhütung von

Hormonfreie Verhütung nach höchsten Qualitätsstandards!

In Zusammenarbeit mit zwei europäischen Herstellern vertreibt Eurim seit langem am Markt bewährte, klassische Kupferspiralen. Die Wahl der geeigneten Kupferspirale muss vom medizinischen Fachpersonal auf Grundlage der Länge und Position der Gebärmutter der Patientin getroffen werden. Gerade bei jungen Frauen wird diese Form der hormonfreien Verhütung durch ihre hormonfreie Wirkung immer beliebter. Unsere Mission ist es, Frauen eine Alternative zu hormoneller Verhütung zu bieten und über die Kupferspirale und ihre hormonfreie Wirkung zu informieren.

Wie wirkt die Kupferspirale?

Die Kupferspirale besteht aus einem Kunststoffkörper, dessen Stamm mit einem feinen Kupferdraht umwickelt ist und teilweise die Arme auch mit Kupfermanschetten versehen werden. Aus dem Kupfer werden kontinuierlich geringste Mengen Kupferionen in die Gebärmutter freigesetzt. Die Spermien werden dadurch in ihrer Beweglichkeit entscheidend beeinträchtigt und erreichen die zu befruchtenden Eizelle nicht oder nicht in zur Befruchtung ausreichender Anzahl. Außerdem führt die Kupferspirale zu einer Fremdkörperreaktion, welche die Schleimhaut der Gebärmutter verändert.

Wann besteht der Verhütungs-Schutz und wie zuverlässig ist die Kupferspirale?

Die Kupferspirale ist sofort nach der Einlage in die Gebärmutter wirksam. Die Kupferspirale ist eine sichere Verhütungsmethode. Sie kann, je nach Modell, fünf bis zehn Jahre in der Gebärmutter verbleiben.

Wann setzt man die Kupferspirale ein?

Kann eine Schwangerschaft ausgeschlossen werden, kann die Spirale grundsätzlich zu jeder Zeit während des Zyklus eingesetzt werden. Es wird jedoch empfohlen, die Spirale während der Menstruation einzusetzen, da zu diesem Zeitpunkt der Muttermund leicht geöffnet ist. Die Kupferspirale kann auch bis zu 5 Tage nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr als Notfallverhütung angewendet werden.

Ist das Einsetzen oder Entfernen der Spirale schmerzhaft?

Normalerweise ist das Einsetzen oder Entfernen der Spirale wenig bis gar nicht schmerzhaft, jedoch unterscheidet sich das Schmerzempfinden von Frau zu Frau. Im Bedarfsfall können zur Schmerzlinderung Medikamente zur Betäubung eingesetzt werden.

Wie oft wird die Spirale kontrolliert?


Einen Monat nach dem Einsetzen oder nach der ersten Menstruation wird die Spirale erstmals kontrolliert, dann bei der halbjährlichen Vorsorge-Untersuchung beim Gynäkologen oder wenn es klinisch notwendig ist.

Wie schnell kann man nach dem Entfernen schwanger werden?

Da die Kupferspirale nicht in den Hormonhaushalt der Frau eingreift, kann man sofort nach dem Entfernen im Rahmen des natürlichen Zyklus schwanger werden.

Kupferspiralen - langfristig - hormonfrei!

Neo-Safe®

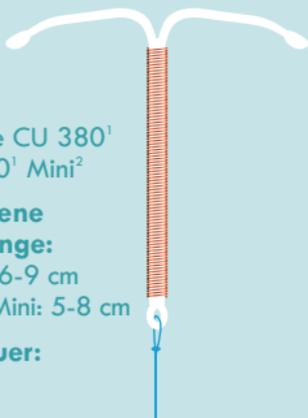


Neo-Safe CU 380¹
& CU 380¹ Mini²

**Empfohlene
Uteruslänge:**

CU 380: 6-9 cm
CU 380 Mini: 5-8 cm

Liegedauer:
5 Jahre

Multi-Safe®

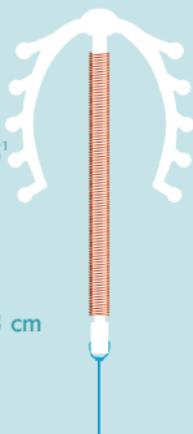


Multi-Safe CU 375¹
& CU 375¹ short²

**Empfohlene
Uteruslänge:**

CU 375: 6-9 cm
CU 375 short: 5-8 cm

Liegedauer:
5 Jahre

CU-Safe®

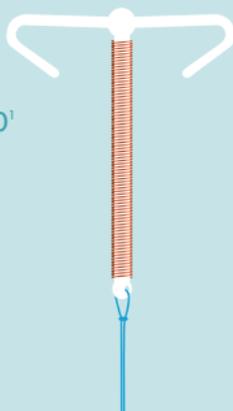

CU-Safe T 300¹

**Empfohlene
Uteruslänge:**
5-8 cm

Liegedauer:
5 Jahre

T-Safe®




T-Safe CU 380A¹ QL
& T-Safe CU 380A^{1,3}

**Empfohlene
Uteruslänge:**
6-9 cm

Liegedauer:
10 Jahre

Die Kupferspiralen sind in Originalgröße abgebildet! ¹ Gibt die Kupferoberfläche in mm² an.
² CU 380 Mini und CU 375 short sind nicht abgebildet. ³ Nur in AT erhältlich.

Flexi-T®

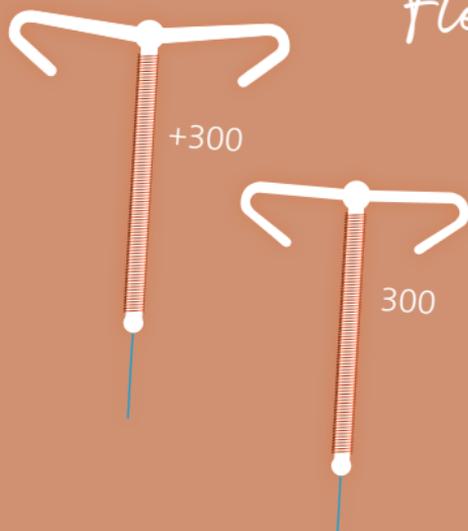

Flexi-T 300¹ & +300¹

Empfohlene Uteruslänge:

Flexi-T 300: 5-6 cm, Flexi-T +300: ≥ 6 cm

Liegedauer: 5 Jahre



Flexi-T +380¹

Empfohlene Uteruslänge:

≥ 6 cm

Liegedauer: 5 Jahre

Vertrieb Österreich durch Gynial GmbH

Welche Kupferspirale ist für mich geeignet?

Die Wahl der geeigneten Kupferspirale hängt im Wesentlichen von den körperlichen Voraussetzungen der Frau (z. B. Uteruslänge, Uterusgröße) ab. Ein Gespräch mit Ihrem/r Arzt/Ärztin und eine entsprechende Untersuchung kann Klarheit schaffen, welche Größe und Form am besten geeignet ist. Besonders Frauen, die noch keine Kinder geboren haben, haben eine kleine Gebärmutter. Hier können unsere Produkte Multi-Safe CU 375 short, Neo-Safe T CU 380 Mini und Flexi-T 300 eine geeignete Variante sein.

Welche Nebenwirkungen können nach dem Einsetzen der Kupferspirale auftreten?

- Leichte Krämpfe
- Verlängerte Menstruationsblutungen in den ersten drei Monaten nach der Einlage
- Zusätzliche Blutungen nach der Einlage
- Leichtes Schwindelgefühl

Weitere Informationen über mögliche Nebenwirkungen erhalten Sie im Beratungsgespräch durch Ihren Gynäkologen/ Ihre Gynäkologin.

*Ihr Gynäkologe/Ihre Gynäkologin berät Sie gerne zur **hormonfreien Verhütung mit Kupferspiralen** von Eurim.*

**Sie haben noch Fragen zum Produkt?
Mehr Informationen finden Sie hier:**



www.eurim-iud.de



www.flexi-t.de



Info:

Eurim Kupferspiralen sind nach dem umfassenden Qualitätsmanagementsystem (aktuell gültige ISO 13485) zertifiziert, welches zahlreichen Kontrollen durch die nationalen Aufsichtsbehörden unterzogen wird. Alle Produkte tragen das international gültige CE - Kennzeichen und enthalten ausführliche Arzt- und Patienteninformationen nach neuem Standard (ISO 7439:2015).

EURIM
PHARM



Sie haben Fragen?

Wir beraten Sie gerne per E-Mail
unter: info-iud@eurim.de

EurimPharm Arzneimittel GmbH
EurimPark 8 • D-83416 Saaldorf-Surheim
www.eurim-iud.de

Hergestellt in Europa (100 % Mitglieder der EurimGruppe):

Mona Lisa

NV, Belgien



BV, Niederlande