



# MONA LISA KUPFER- SPIRALEN

IHRE HORMONFREIE  
VERHÜTUNG



**Hormonfrei** verhüten  
mit **Kupferspiralen**  
von **Mona Lisa**.



Individuell sicher und hormonfrei.  
Mona Lisa Kupferspiralen.


# MONA LISA

## KUPFERSPIRALEN




### Mona Lisa Neo-Safe®

T CU 380

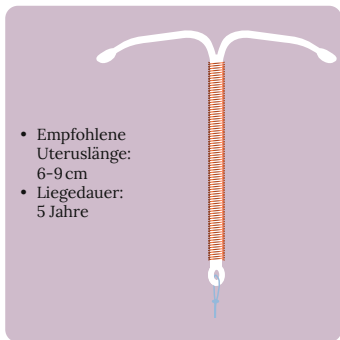


### Mona Lisa Neo-Safe®

T CU 380 Mini

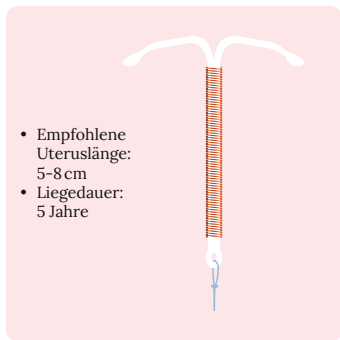


### Mona Lisa Multi-Safe®

CU 375

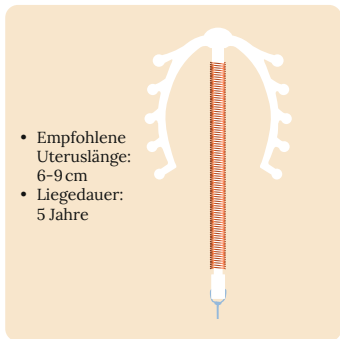

### Mona Lisa Multi-Safe®


CU 375 short

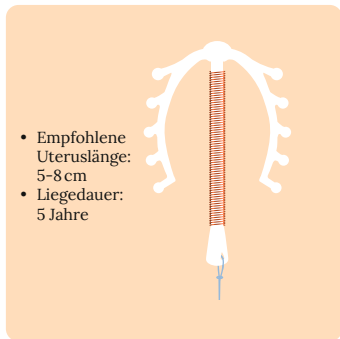

# MONA LISA KUPFERSPIRALEN



## Mona Lisa T-Safe® CU 380A\* & CU 380A QL

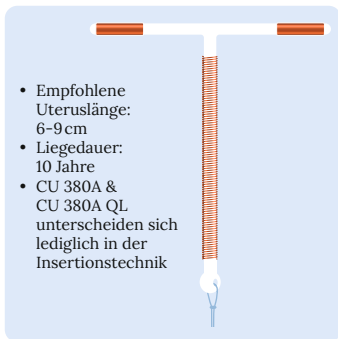

**Sie haben noch Fragen zum Produkt? Einfach QR-Code scannen und informieren:**



**Hergestellt in Europa.**  
100% Mitglied der eurimGROUP.

[eurim-iud.de](http://eurim-iud.de)

Die Kupferspiralen sind in Originalgröße abgebildet!  
Die Ziffern im Produktnamen geben die Kupferoberfläche in mm<sup>2</sup> an.  
\* Nur in AT erhältlich.

# HORMONFREIE VERHÜTUNG NACH HÖCHSTEN QUALITÄTSSTANDARDS!



Seit 1996 ist Mona Lisa einer der weltweit führenden Hersteller von Kupfer-Intrauterinpressaren mit Sitz in Belgien. Das aktuelle Portfolio umfasst verschiedene Kupferspiralen. Eine Vielfalt, die der Mission von Mona Lisa Rechnung trägt: eine hormonfreie und individuelle Verhütungsmethode anzubieten, die den Bedürfnissen aller Frauen gerecht wird.

Die Wahl der geeigneten Kupferspirale muss vom medizinischen Fachpersonal auf Grundlage der Länge und Position der Gebärmutter der Patientin getroffen werden.

## Wie wirkt die Kupferspirale?

Die Kupferspirale besteht aus einem Kunststoffkörper, dessen Stamm mit einem feinen Kupferdraht umwickelt ist. Teilweise sind auch die Arme mit Kupfermanschetten versehen. Aus dem Kupfer werden kontinuierlich geringste Mengen Kupferionen in die Gebärmutter freigesetzt. Die Spermien werden dadurch in ihrer Beweglichkeit entscheidend beeinträchtigt und erreichen die zu befruchtende Eizelle nicht oder nicht in zur Befruchtung ausreichender Anzahl. Außerdem führt die Kupferspirale zu einer Fremdkörperreaktion, welche die Schleimhaut der Gebärmutter verändert.

## Wann besteht der Verhütungsschutz und wie zuverlässig ist die Kupferspirale?

Die Kupferspirale ist sofort nach der Einlage in die Gebärmutter wirksam. Die Kupferspirale ist eine sichere Verhütungsmethode. Sie kann, je nach Modell, fünf bis zehn Jahre in der Gebärmutter verbleiben.

## **Wann setzt man die Kupferspirale ein?**

Kann eine Schwangerschaft ausgeschlossen werden, kann die Spirale grundsätzlich zu jeder Zeit während des Zyklus eingesetzt werden. Es wird jedoch empfohlen, die Spirale während der Menstruation einzusetzen, da zu diesem Zeitpunkt der Muttermund leicht geöffnet ist. Die Kupferspirale kann auch bis zu 5 Tage nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr als Notfallverhütung angewendet werden.

## **Ist das Einsetzen oder Entfernen der Spirale schmerzhaft?**

Normalerweise ist das Einsetzen oder Entfernen der Spirale wenig bis gar nicht schmerzhaft, jedoch unterscheidet sich das Schmerzempfinden von Frau zu Frau. Im Bedarfsfall können zur Schmerzlinderung Medikamente zur Betäubung eingesetzt werden.

## **Wie oft wird die Spirale kontrolliert?**

Einen Monat nach dem Einsetzen oder nach der ersten Menstruation wird die Spirale erstmals kontrolliert, dann bei der halbjährlichen Vorsorge-Untersuchung beim Gynäkologen oder wenn es klinisch notwendig ist.

## **Wie schnell kann man nach dem Entfernen schwanger werden?**

Da die Kupferspirale nicht in den Hormonhaushalt der Frau eingreift, kann man sofort nach dem Entfernen im Rahmen des natürlichen Zyklus schwanger werden.



## Welche Kupferspirale ist für mich geeignet?

Die Wahl der geeigneten Kupferspirale hängt im Wesentlichen von den körperlichen Voraussetzungen der Frau (z. B. Uteruslänge, Uterusgröße) ab. Ein Gespräch mit Ihrem/r Arzt/Ärztin und eine entsprechende Untersuchung kann Klarheit schaffen, welche Größe und Form am besten geeignet ist. Besonders Frauen, die noch keine Kinder geboren haben, haben eine kleine Gebärmutter. Hier können unsere Produkte Multi-Safe® CU 375 short und Neo-Safe® T CU 380 Mini eine geeignete Variante sein.

## Welche Nebenwirkungen können nach dem Einsetzen der Kupferspirale auftreten?

- Leichte Krämpfe
- Verlängerte Menstruationsblutungen in den ersten drei Monaten nach der Einlage
- Zusätzliche Blutungen nach der Einlage
- Leichtes Schwindelgefühl

Weitere Informationen über mögliche Nebenwirkungen erhalten Sie im Beratungsgespräch durch Ihren Gynäkologen/Ihre Gynäkologin. Dieser berät Sie gerne zur hormonfreien Verhütung mit Kupferspiralen von Mona Lisa.



**eurimhealth x Mona Lisa**  
[www.eurimhealth.com](http://www.eurimhealth.com)

**eurimhealth** ist eine innovative Marke der **eurimGROUP**, die sich auf den Vertrieb von hochwertigen Gesundheitsprodukten und umfassende Lösungen im Healthcare-Bereich spezialisiert hat. Unter der Marke **eurimhealth** vereint die Gruppe verschiedene Vertriebsmarken unter einem gemeinsamen Namen.

In **Deutschland** wird die Mona Lisa Produktpalette exklusiv von EurimPharm Arzneimittel GmbH vertrieben.

In **Österreich** wird die Mona Lisa Produktpalette exklusiv von EurimPharm Vertriebs-GmbH & Co KG vertrieben.

---

**Mona Lisa Kupferspiralen** sind nach dem umfassenden Qualitätsmanagementsystem (aktuell gültige ISO 13485) zertifiziert, welches zahlreichen Kontrollen durch die nationalen Aufsichtsbehörden unterzogen wird. Alle Produkte tragen das international gültige CE - Kennzeichen und enthalten ausführliche Arzt- und Patienteninformationen nach neuem Standard (aktuell gültige ISO 7439).



[www.eurim-group.com](http://www.eurim-group.com)



**Mona Lisa N.V., Belgium**  
[www.monalisa.eu](http://www.monalisa.eu)

**Sie haben Fragen?**

Wir beraten Sie gerne per E-Mail unter: [info-iud@eurim.de](mailto:info-iud@eurim.de)

**Vertrieb Deutschland:**

**EurimPharm Arzneimittel GmbH**

EurimPark 8

D-83416 Saaldorf-Surheim

**Vertrieb Österreich:**

**EurimPharm Vertriebs-GmbH & Co KG**

Michael-Walz-Gasse 18d

A-5020 Salzburg

**eurim**GROUP

[www.eurim-group.com](http://www.eurim-group.com)