



# EURIM IHR PARTNER FÜR **HORMONFREIE VERHÜTUNG**



**Kupfer IUPs**  
Hormonfrei & langfristig.



**Eurim Kupfer IUPs:**  
Individuell sicher und hormonfrei.

# KUPFER-IUPS NACH INTERNATIONALEM STANDARD



**Alle von Eurim vertriebenen IUPs sind klassische, am Markt bewährte Kupfer-IUPs. Die Wahl des geeigneten Kupfer-IUPs hängt im Wesentlichen von patienten-individuellen Wünschen und Voraussetzungen (z. B. Länge und Form der Gebärmutter) ab.**

Der Körper des IUP besteht aus Polyethylen und ist spiralförmig mit Kupfer umwickelt. Die Beigabe von Bariumsulfat ermöglicht den radiologischen Nachweis des IUPs.

Der weiche Rückholfaden und die sichere, gutsitzende Kupferumwicklung verringern Irritationen. Die Gesamtoberfläche des Kupfers variiert zwischen 300mm<sup>2</sup> und 380mm<sup>2</sup> und bedingt somit eine unterschiedliche Liegedauer des IUPs im Körper (zwischen 5 und 10 Jahren). Die Reinheit des Kupfers beträgt 99,99%. Eine Kupferallergie ist eine Kontraindikation für die Verwendung einer Spirale. Allergische Reaktionen durch andere Elemente, wie z.B. Nickel, können aufgrund der Reinheit des Kupfers ausgeschlossen werden.

Der Rückholfaden am unteren Ende des Kunststoffkörpers ist aus reißfestem Nylon bzw. Polypropylen. Eine sichere, reißfeste Sterilverpackung schützt unsere IUPs. Alle Flexi-T Produkte sind in einem Blister verpackt.

Wie vom Gesetz vorgeschrieben, sind Eurim Kupfer-IUPs nach dem umfassenden Qualitätsmanagementsystem (aktuell gültige ISO 13485:2016 sowie Medizinprodukte-Richtlinie 93/42/EWG) zertifiziert, das zahlreichen Kontrollen durch die nationalen Aufsichtsbehörden unterzogen wird. Alle Produkte tragen, wie gesetzlich vorgeschrieben, die EU-weit gültige CE-Kennzeichnung und enthalten ausführliche Arzt- und Patienteninformationen nach neuem Standard ISO 7439 in der aktuellen Version.



Eine Marke der eurimGROUP  
[eurimhealth.com](http://eurimhealth.com)

eurimGROUP

[eurim-group.com](http://eurim-group.com)

# MONA LISA KUPFER IUPs



## Mona Lisa T-Safe® CU 380A\*\* & CU 380A QL

Optimaler, sicherer Sitz im Uterus:  
geringe Ausstoßraten:

**CU 380A\*\***

- Kupferoberfläche:  
380 mm<sup>2</sup>
- Liegedauer:  
10 Jahre

**CU 380A QL**

- Identische Eigen-  
schaften wie CU 380A
- Einfaches und schnelles  
Laden des IUPs mit Hilfe  
des neuen Quick-Load-  
Systems.

\*\* Vertrieb nur in Österreich



# HORMONFREIE VERHÜTUNGSMITTEL




## Mona Lisa Neo-Safe®

### T CU 380 & T CU 380 Mini

Gleiches Design wie „Nova T“. Einfache Handhabung, schmerzfreieres Einführen und Entfernen. Erhältlich in 2 Versionen:


#### T CU 380

- Kupferoberfläche: 380 mm<sup>2</sup>
- Liegedauer: 5 Jahre

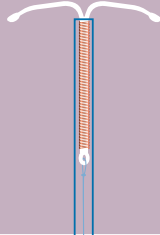

#### T CU 380 Mini

- Identische Eigenschaften wie T CU 380
- Ideal geeignet für kurze Uteruslängen

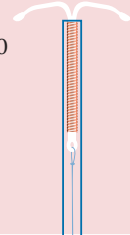


## Mona Lisa Multi-Safe®

### CU 375 & CU 375 Short

Baugleich zum langjährig bewährten Bestseller „Multiload“. Erleichtertes Einsetzen durch Einhandtechnik. Erhältlich in 2 Versionen:

#### CU 375

- Kupferoberfläche: 375 mm<sup>2</sup>
- Liegedauer: 5 Jahre

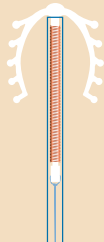

#### CU 375 Short

- Identische Eigenschaften wie CU 375
- Kürzere Stammlänge (29,4 mm); ideal geeignet für kurze Uteruslängen



# HORMONFREIE VERHÜTUNG




## Flexi-T®

300\* & +300\*

Einfaches, schmerzfreies Einführen und Entfernen.  
Einhandtechnik. Einfach geführter Rückhohlfaden.


### 300

- Kupferoberfläche:  
300 mm<sup>2</sup>
- Liegedauer:  
5 Jahre
- Kleinstes erhältliches  
Kupfer-IUP
- Ideal geeignet für  
Nullipara

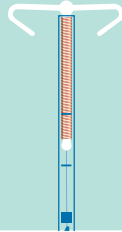

### +300

- Identische Eigen-  
schaften wie 300
- Ideal geeignet für  
Uni- und Multipara

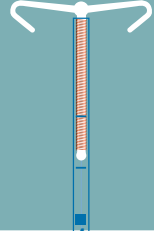


## Flexi-T®

+380\*

Einfaches, schmerzfreies Einführen und Entfernen.  
Einhandtechnik. Einfach geführter Rückhohlfaden.

### +380

- Kupferoberfläche:  
380 mm<sup>2</sup>
- Liegedauer:  
5 Jahre
- Ideal geeignet für  
Uni- und Multipara

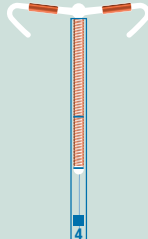

\*Vertrieb der gesamten Flexi-T Linie in Österreich durch Gynial GmbH



# WISSENSWERTES ZU KUPFER IUPS

## Abmessungen/Liegedauer der Kupferspiralen:

Kupfer-IUPS	Breite (mm)	Länge (mm)	Maximale Liegedauer des IUPS im Körper	Empfohlene Uteruslänge
Mona Lisa Multi-Safe® CU 375	19,5	35,2	5 Jahre	6 – 9 cm
Mona Lisa Multi-Safe® CU 375 short	19,5	29,4	5 Jahre	5 – 8 cm
Mona Lisa T-Safe® CU 380A**	31,9	35,9	10 Jahre	6 – 9 cm
Mona Lisa T-Safe® CU 380A QL	31,9	35,9	10 Jahre	6 – 9 cm
Mona Lisa Neo-Safe® T CU 380	31,8	31,9	5 Jahre	6 – 9 cm
Mona Lisa Neo-Safe® T CU 380 Mini	24,0	30,0	5 Jahre	5 – 8 cm
Flexi-T® 300*	22,8	29,2	5 Jahre	5 – 6 cm
Flexi-T® +300 & +380*	27,8	32,0	5 Jahre	≥ 6 cm

\*\*Vertrieb nur in Österreich \*Vertrieb der gesamten Flexi-T Linie in Österreich durch Gynial GmbH

Die Anwendung von Kernspinuntersuchungen bei Frauen, die ein Kupfer-Intrauterinpessar zur Empfängnisverhütung tragen, beeinträchtigt bei einer Stärke von bis zu 3,0 Tesla weder die MRT Untersuchungsergebnisse noch die Funktionstüchtigkeit des Kupfer-IUPS.

**Vertrieb Deutschland:**  
**EurimPharm Arzneimittel GmbH**  
EurimPark 8  
83416 Saaldorf-Surheim

**Vertrieb Österreich:**  
**EurimPharm Vertriebs-GmbH & Co KG**  
Michael-Walz-Gasse 18d  
A-5020 Salzburg

**Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?**

E-Mail: [info-iud@eurim.de](mailto:info-iud@eurim.de)